


TAILLE MÉDICALE – CHOISIR LA TAILLE ADÉQUATE :

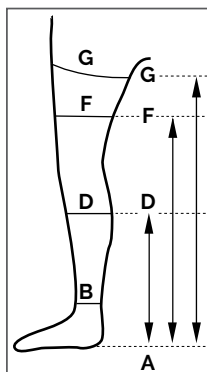

- Obtenir les mesures du patient auprès d'un professionnel de la santé certifié.
 - Les mesures devraient être prises tôt dans la journée avant que l'enflure ne survienne.
 - Les mesures ne devraient pas être prises par le patient.
 - Établir les préférences à l'égard du style (longueur : genou ou cuisse; extrémité ouverte ou fermée aux orteils, couleur).
 - Obtenir la taille du patient pour établir s'il convient d'opter pour des articles réguliers ou longs. Mesurer entre les points A et D pour obtenir la longueur aux genoux; entre A et F pour la longueur aux cuisses.
 - Établir les mesures de la circonférence aux points B, D et F, selon le style désiré.
- Considérer en priorité les résultats du tableau pour la cheville (B) si les autres mesures (points D, F, G) suggèrent une taille différente.

A = sol
B = cheville

D = milieu du mollet, où la circonférence est la plus grande
F = point central entre le genou et l'emplacement G
G = zone pubienne

Longs ou courts

LENGTH / LONGUEUR

| | SHORT / COURT | | LONG | |
|-----|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | inches / pouces | cm | inches / pouces | cm |
| A-D | 13 - 15 | 34 - 38 | 15 - 17 | 39 - 44 |
| A-F | 20 - 23 | 52 - 59 | 23 - 27 | 60 - 68 |
| A-G | 24 - 28 | 62 - 71 | 28 - 32 | 72 - 82 |

Mesures de la circonférence

CIRCUMFERENCE / CIRCONFÉRENCE

| | SMALL / PETIT | | | | | MEDIUM | | | | | LARGE / GRAND | | | | | X-LARGE / T-GRAND | | | | | XX-LARGE / TT-GRAND | | | |
|----------|-----------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------|----------|---------|----------|-----------|-----------------|----------|-----------|---------|----------|-------------------|-------|--------|-------|----------|---------------------|-------|--------|-------|
| | inches / pouces | | cm | | | inches / pouces | | cm | | | inches / pouces | | cm | | | inches / pouces | | cm | | | inches / pouces | | cm | |
| | normal | max | normal | max | | normal | max | normal | max | | normal | max | normal | max | | normal | max | normal | max | | normal | max | normal | max |
| G | 16-18 | 18-20 | 42-46 | 47-51 | G | 18-20 | 20-22 | 47-51 | 52-57 | G | 20-22 | 23-25 | 52-57 | 58-63 | G | 23-25 | 25-28 | 58-63 | 64-70 | G | 25-28 | 28-31 | 64-70 | 71-78 |
| F | 14-16 | 16-18 | 37-40 | 41-45 | F | 16-18 | 18-20 | 41-45 | 46-50 | F | 18-20 | 20-22 | 46-50 | 51-56 | F | 20-22 | 22-25 | 51-56 | 57-62 | F | 22-25 | 25-27 | 57-62 | 63-69 |
| D | 11-12 | 12-13 | 28-30 | 31-34 | D | 12-13 | 14-15 | 31-34 | 35-38 | D | 14-15 | 16-17 | 35-38 | 39-42 | D | 16-17 | 17-19 | 39-42 | 43-47 | D | 17-19 | 19-21 | 43-47 | 48-52 |
| B | 6,6 - 8,2 | 17 - 21 | B | 8,2 - 9,8 | 21 - 25 | B | 9,8-11,4 | 25 - 29 | B | 11,4-12,9 | 29 - 33 | B | 12,9-14,5 | 33 - 37 | | | | | | | | | | |